

REF: AD13 CENTURA FIXARE TRUNCHI CU INCHIDERE CU CATARAME

Dispozitiv medical de clasa I conform Directivei Europene privind Dispozitivele Medicale 2017/745 și ca atare respectă cerințele esențiale care i se aplică. Pentru a asigura funcționarea corectă și performanța optimă a acestui dispozitiv medical, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Verificați ca aspectul exterior al produsului și integritatea acestuia să fie corespunzătoare, precum și integritatea ambalajului.

Conținutul pachetului: 1 centură de scaun, 1 manual de instrucțiuni, 1 flyer de publicitate.

INDICAȚII: Fixarea confortabilă a pacientului pe scaunul cu roțile, prevenind posibilele căderi. Potrivit pentru pacienții cu o masă musculară scăzută în zona trunchiului deoarece asigură o stabilitate adecvată a acestuia, prevenind deplasările laterale și alunecarea. Posibilitate de prelungire pt adaptare personalizată în combinație cu extensia CAD16.

CONTRAINDICAȚII: Produsul este contraindicat în caz de agitație a pacientului și pentru pacienții care pot detașa dispozitivul sau pot debloca cataramele singuri. A nu se utiliza în caz de alergii la oricare dintre componentele produsului.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ: Se recomandă ca produsul să fie instalat de personal calificat și instruit. Starea produsului trebuie verificată în mod regulat. Nu trebuie făcute modificări produsului original. Acest produs nu trebuie să fie în contact direct cu o zonă rănită. Este recomandată verificarea frecventă a faptului că produsul este utilizat corect de către utilizator.

Nu lăsați niciodată dispozitivul la îndemâna copiilor și/sau a persoanelor care nu pot avea grijă de ei înșiși. Din cauza naturii textile a componentelor, nu expuneți produsul la o sursă de căldură sau umiditate. Nu se cunosc efecte secundare.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

1. Deschideți toate cataramele centurii și așezați pacientul în scaunul cu roțile.

2. Așezați partea căptușită pe abdomenul utilizatorului și plasați curelele abdominale și curelele

bretelelor spre spatele scaunului.

3. Uniți cele două curele abdominale închizând cataramele negre și ajustând dimensiunea dorită.

4. Atașați bretelele peste umeri închizând cele două catarami maro și reglați dimensiunea dorită.



MĂRIMEA:


MARIME	LUNGIME CAPTUSITA	LATIME CENTRALA	PERIMETRU TOTAL	LUNGIME TOTALA CURELE
0	40 cm	12,5 cm	1,50 cm	100 cm
1	56 cm	16,5 cm	1,50 cm	100 cm

COMPOZIȚIE: țesătură laminată 100% poliester. Banda pentru pensionari 100% poliester. Cataramă: acetal. Fir: 100% nailon

DEPOZITARE: Se spală la mașină la maxim 60°. Nu curățați uscat sau călcați. Nu uscați cu mașina. Închideți catarama la spălare.

A nu se folosi înălbitor.

A se pastra la loc uscat, ferit de lumina, la temperatura camerei in ambalajul original.

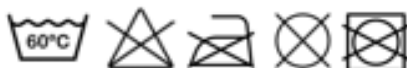

REUTILIZARE: Având în vedere scopurile sale terapeutice, acest produs nu este reutilizabil de către o altă persoană.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR: În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, produsul și componentele acestuia respectă prevederile impuse de către autoritățile locale.

GARANȚIE: 24 de luni de la data achiziției. Trebuie să păstrați factura ca dovadă de cumpărare pentru orice reclamație. Produsul este destinat exclusiv utilizării descrise în acest manual. Orice deteriorare rezultată din utilizarea necorespunzătoare este exclusă din garanție.

Daunele sunt limitate la valoarea bunurilor. Despăgubirea pentru daunele indirecte este exclusă în mod expres.

Orice incident grav care implică produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a Statului Membru unde este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.



SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L.U
Pol Talluntxe II-C/c- nº68 31110 Noain (Navarra) Spain

