

Dispozitiv medical de clasa I, în conformitate cu Directiva europeană 2017/745 privind dispozitivele medicale și, ca atare, respectă cerințele esențiale care i se aplică.

Pentru a asigura funcționarea corectă și performanța optimă a acestui dispozitiv medical, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Verificați aspectul extern corect al produsului și integritatea acestuia, precum și integritatea ambalajului.

Conținutul pachetului: 1 mănușă, 1 manual de instrucțiuni, 1 foaie publicitară.

INDICAȚII: Produs de protecție dezvoltat pentru a preveni auto-vătămarea pacientului. Material de căptușeală antialergic, antibacterian și foarte rezistent.

CONTRAINDICAȚII: A nu se utiliza în caz de alergie la oricare dintre componente.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ: Starea produsului trebuie verificată periodic. Nu trebuie să se facă nicio modificare la produsul original. Acest produs nu trebuie să fie pus în contact direct cu o zonă lezată. Se recomandă verificarea frecventă și verificarea faptului că utilizatorul folosește corect produsul. Din cauza naturii textile a componentelor, nu expuneți produsul la căldură sau umiditate. Nu există efecte secundare cunoscute.

INSTRUCȚIUNI DE STABILIRE:

- 1° Introduceți mâna pacientului în mănușă și închideți Velcro-ul interior.
- 2° Închideți Velcro-ul exterior.

Mărime: O mărime




DIMENSIUNE	Lungime	Lățime
UNICA	28cm	19 cm

COMPOZIȚIE: Material: 100% bumbac. Umplutură: Fibră de silicon goală. Cataramă: Acetal. Velcro și astrahan: 100% poliamidă.

DEPOZITARE ȘI DEPOZITARE: Se spală la mașină la maximum 30°. Nu curățați în uscat și nu călcați. Nu se usucă la mașina de uscat. Nu se înălbesc.

Depozitați produsul într-un loc uscat, protejat de lumină, la temperatura camerei, în ambalajul său original.

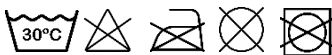

REUTILIZARE: Datorită scopurilor sale terapeutice, acest produs nu poate fi reutilizat de o altă persoană.

GESTIONAREA DEȘEURILOR: În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, produsul și componentele sale sunt în conformitate cu dispozițiile în vigoare stabilite de autoritățile locale. Termen de valabilitate: 12 luni.

GARANȚIE: 24 de luni de la data achiziției. Trebuie să păstrați factura ca dovadă a achiziției pentru orice reclamație. Produsul este destinat exclusiv utilizării descrise în acest manual. Orice deteriorare rezultată în urma unei utilizări necorespunzătoare este exclusă din garanție. Daunele sunt limitate la valoarea produselor. Despăgubirile pentru daune indirecte sunt excluse în mod expres.

Orice incident grav în care este implicat dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care sunt stabiliți utilizatorul și/sau pacientul.

